



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Эндомотор Sunt smil



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Использование	4
3. Меры предосторожности.....	4
4. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	6

1. Об устройстве

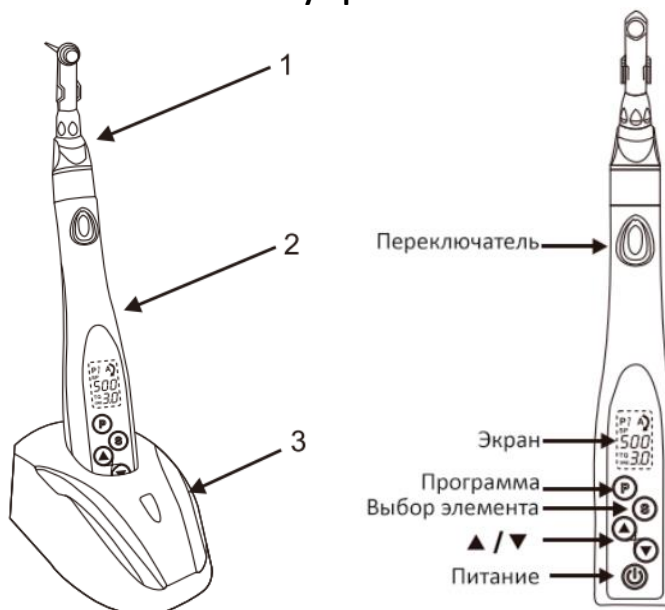

1. Наконечник;
2. Хвост;
3. База.

Нажмите питание чтобы включить\выключить устройство.

Переключатель:

Когда питание включено, нажмите «Переключатель», чтобы включить\выключить двигатель.

Клавиша выбора элемента S:

Нажмите, чтобы выбрать скорость и крутящий момент.

- Последовательность передачи: Настройка скорости (SP) - клавиша выбора элемента S.
- Настройка крутящего момента (TQ) - клавиша выбора элемента S - Настройка скорости (SP).
- Выбранный элемент будет мигать.

Настройки скорости и крутящего момента можно изменять во время работы машины.


Последовательность передачи (то же самое) (крутящий момент нельзя задать вручную в программах P2 и P4).

Программа:


Нажмите, чтобы выбрать 1 из 6 видов рабочих процедур, как показано ниже:



Положительное автоматическое движение на 360°, вращение вперед плюс реверсивный крутящий момент, затем снимите крутящий момент, чтобы восстановить движение вперед.

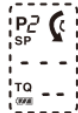

Система обратного возвратно-поступательного движения, назад 150°, вперед 30 (приближение).

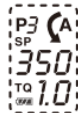

Автоматическое движение назад на 360°, вращение в обратном направлении плюс крутящий момент вперед, затем снимите крутящий момент, чтобы восстановить реверс.



Система прямого возвратно-поступательного движения, вперед 150°, назад 30° (приближение).



Поворот на 360°, при возникновении крутящего момента, пожалуйста, остановитесь. Использование ручного напильника для возвратно-поступательного движения Угловой наконечник или напильника с антикраевой напильником для удаления сломанной иглы.




Реверс на 360°, при возникновении крутящего момента остановитесь. Использование напильника с острой кромкой для удаления сломанной иглы.

После завершения настройки клавиш и ожидания, пока экран перестанет мигать, программа будет автоматически сохранена, в это время нажмите клавишу переключения программ P, и заданное значение предыдущей страницы будет автоматически сохранено.

При резке двигайтесь по часовой стрелке.

Используйте ∇ / \blacktriangle для выбора параметров.

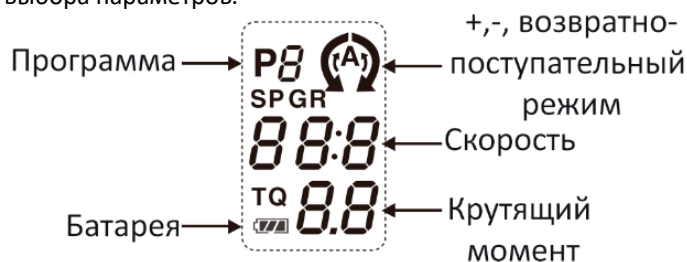

2. Использование

При подключении к хосту вставьте установочный штифт наконечника в установочный слот хоста до щелчка.

При извлечении вытяните его в параллельном и прямом направлении.

Удерживайте кнопку питания, отобразится экран. Затем нажмите выключатель двигателя, начнется вращение, и загорится свет. Наконец, снова нажмите выключатель двигателя, чтобы остановить вращение, и светодиод погаснет через 8 секунд.

Удерживайте выключатель двигателя и не отпускайте его, он продолжит вращаться, и свет загорится, если вы отпустите его, он перестанет вращаться, и светодиод также погаснет через 8 секунд.

После окончания устройство начнет останавливаться при нажатии выключателя двигателя; затем удерживайте кнопку питания, чтобы отключить электрический ток; выньте держатель лампы из наконечника, а затем выньте наконечник из хоста, тем временем закройте крышку двигателя.

Функция автоматического отключения питания:

Источник питания автоматически прекратит работу примерно через 5 минут.

Функция носителя данных. Сохраните данные до выключения, в следующий раз при загрузке он восстановит предыдущие данные.

3. Меры предосторожности

- Устройство должно эксплуатироваться исключительно с оригинальными аксессуарами производителя.
- Перед заменой углового наконечника или файла, выключите питание прибора. Случайное касание кнопки Вкл./Выкл. может привести к непреднамеренному вращению.
- Всегда очищайте хвостовую часть файла, который будет использован.
- Попадание загрязнений в цангу может привести к потере соосности или резкому ухудшению силы зажима.
- Во время установки аккумулятора обращайте внимание на направление соединителя. Принудительная установка в неправильном направлении может привести к повреждению и вытеканию жидкости, вследствие короткого замыкания.
- Полностью заряженные аккумуляторы, даже при условии, что прибор не эксплуатируется, со временем постепенно разряжаются.
- Рекомендуется зарядить батарею непосредственно перед использованием прибора.
- При повторном включении автоматически отключенного устройства, данные о низком заряде батареи, могут быть отображены не сразу.

4. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате **WhatsApp**. Для этого запустите приложение **WhatsApp**. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!