



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная система obturации

Sunt smil




Введение

Модель: OP-Fill может нагреваться до 200 °С за 3 секунды и плавить все виды гуттаперчи. Она поддерживает вертикальную конденсацию гуттаперчи для заполнения корневого канала (главным образом апикальной части) и предназначена исключительно для использования обученными стоматологами в клинике или лаборатории.

Меры предосторожности

Внимание: Температура наконечника очень высокая во время процедуры, чтобы избежать ожога, не допускайте его прямого контакта с мягкими тканями полости рта.

Знакомство с устройством

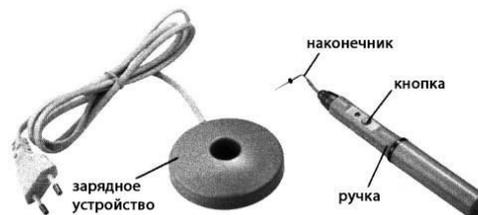

1. Зарядная база — 1 шт.
2. Obturационная ручка — 1 шт.
3. Наконечники — 2 шт.

Характеристики

Модель	OP-Fill AC110V	OP-Fill AC220V
Питание	AC 110V, 50–60 Гц	AC 220V, 50–60 Гц
Мощность	10 Вт	10 Вт
Размер упаковки	165 × 125 × 38 мм	165 × 125 × 38 мм

2

Установка

Устройство состоит из наконечника, obturационной ручки и зарядной базы.

Установка наконечника



Предупреждение: Будьте осторожны, чтобы не получить ожог при установке наконечника ручки.

Использование

Нагрев: Нажмите кнопку, чтобы нагреть наконечник, индикатор LED загорится красным. Наконечник может достичь рабочей температуры в течение 3 секунд.

Зарядка: Установите obturационную ручку на зарядную базу, индикатор LED загорится синим. Для полной зарядки при низком заряде требуется не менее 8 часов непрерывной зарядки.

Стерилизация и обслуживание

Пожалуйста, очищайте и стерилизуйте наконечник ручки перед каждым использованием.

1. Остатки гуттаперчи можно очистить медицинским ватным тампоном.
2. Внешнюю поверхность нагревательного блока и зарядной базы очищайте мягкой тканью, смоченной в мягком моющем средстве или спирте. Поверхность должна быть защищена пластиковым барьером для предотвращения загрязнения и изменения цвета.
3. Не используйте сильные дезинфицирующие средства или содержащие отбеливатель или хлорид аммония для очистки устройства.
4. Не стерилизуйте нагревательный блок и зарядную базу в автоклаве.
5. После каждого использования стерилизуйте наконечники в автоклаве при 121 °С в течение 60 минут.

3

Транспортировка и хранение

1. Во время транспортировки обращайтесь осторожно, избегайте сильной тряски.
2. Условия хранения:
 - a. Температура окружающей среды: -10 - 55 °С
 - b. Относительная влажность: <85%

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

4