



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Слуховой аппарат VHP-1607



Введение

Благодарим вас за выбор усилителя слуха VHP-1607. Благодаря своему небольшому размеру и низкому уровню искажений, усилитель слуха поможет вам наслаждаться более полноценной жизнью. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете обратиться к местным дистрибьюторам, они будут рады вам помочь, или напрямую в наш заводской отдел технического обслуживания. Перед использованием внимательно прочтите руководство под руководством врача.

Знакомство с устройством



Характеристики


Характеристики	Значение	Погрешность
Размер	21,7x15x21,9 мм	
Вес	3 г	
Рабочее напряжение	3,7 В	+5%, -10%
Рабочий ток	≤ 1,4 мА	
Частотные характеристики	300-5000 Гц	
Максимальная насыщенность	≤ 128	+3 дБ

2


акустической мощности		
Среднее значение высокой частоты	106	+4 дБ
Полное акустическое усиление	28	+5 дБ
Общее гармоническое искажение	≤ 7%	+3 %
Эквивалентный входной шум	≤ 29	+3 дБ

Использование

1. Выберите оптимальный размер амбушюры для вашего уха, при необходимости измените её.

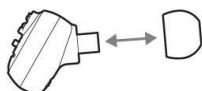

2. Перед использованием установите низкий уровень громкости.

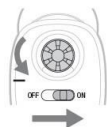

3. Поверните переключатель в положение «ВКЛ».

4. Вставьте усилитель слуха в ухо.



5. Обязательно выключайте его после использования, чтобы экономить энергию.


3

6. При необходимости зарядите усилитель слуха для следующего использования.

Регулировка громкости

1. Поверните ручку громкости по часовой стрелке, громкость становится все больше и больше. Громкость становится самой большой, когда ручка громкости больше не может вращаться.

2. Поверните ручку громкости против часовой стрелки, громкость становится все ниже и ниже. Громкость становится самой низкой, когда ручка громкости больше не может вращаться.

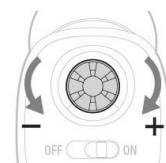

Зарядка

1. Подключите прилагаемый адаптер питания к розетке и подключите зарядный кабель к зарядному устройству усилителя слуха.

2. Индикатор зарядки зарядного устройства всегда будет гореть КРАСНЫМ после подключения питания.



3. Выключите усилитель слуха и поместите его в зарядное устройство, как показано на рисунке, убедитесь, что контакты зарядки наушника и станции соприкасаются.

4



4. Индикатор зарядки усилителя слуха будет гореть СИНИМ во время зарядки. И станет ЗЕЛЕНЫМ, когда он полностью заряжен. Весь процесс зарядки занимает около 1 часа.



5. Срок службы аккумулятора может составлять до 30 часов, если он полностью заряжен.
6. Пожалуйста, заряжайте усилитель слуха вовремя, чтобы не повлиять на производительность и срок службы аккумулятора.
7. Запрещается подключать устройство напрямую к розетке переменного тока 110 В-220 В ~50-60 Гц.
8. Пожалуйста, выньте вилку из розетки, если во время процесса зарядки возникли какие-либо отклонения. (Например, запах, высокая температура, деформация)
9. Емкость встроенного аккумулятора больше или равна 60% от номинальной емкости после 500 циклов зарядки и разрядки.
10. Пожалуйста, используйте требуемый адаптер для зарядки, чтобы избежать проблем с безопасностью. Его параметры: 100-240 В 50-60 Гц, 0,2-0,25 А. Вывод: 5 В 1 А

5

Меры предосторожности

1. Это изделие не является водонепроницаемым, поэтому пользователь должен самостоятельно позаботиться о том, чтобы вода не попала в устройство. Если вода попала в изделие, поместите слуховой аппарат в теплое место для просушки.
2. Используйте его только в ситуациях, требующих усиления звука, например, при просмотре фильмов, телевизора, прослушивании радио и т. п. Слуховой аппарат не может усиливать экстремальные звуки.
3. Выключайте изделие, если оно не используется в течение длительного времени.
4. Не используйте вблизи рентгеновского аппарата или аппарата МРТ.

Важно увеличивать громкость очень постепенно, чтобы избежать резкого усиления звука.

Дети не должны использовать это изделие. Если у вас возникли какие-либо проблемы, обратитесь к отолоту.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Звук искаженный	Уменьшите громкость. Зарядите устройство. Очистите амбушюру и ухо от загрязнений.
Звук слабый	Зарядите устройство. Увеличьте громкость. Замените микрофон. Очистите амбушюру и ухо от загрязнений.
Слышен свист	Вставьте амбушюру обратно, пока она не зафиксируется надежно. Уменьшите громкость. Очистите амбушюру.
Не работает	Установите другой размер амбушюры. Зарядите устройство. Проверьте, не поврежден ли микрофон.

6

Хранение

Хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией и относительной влажностью воздуха не более 80%, без едких газов.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

7