



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стоматологическое фотооборудование Sunt smil



Введение

Благодарим за покупку.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации этого продукта.
- Сохраняйте это руководство при передаче изделия третьим лицам.
- Соблюдайте все предупреждения и следуйте инструкциям, указанным в этом руководстве.

Внимание

- Не размещайте продукт в местах, где присутствуют коррозионные химические вещества, чтобы предотвратить его коррозию, так как коррозия может привести к неисправности устройства.
- Для очистки изделия используйте только микрофибру и сухую ткань.
- Работайте с устройством осторожно, чтобы не повредить его при падении или физическом воздействии.
- Не оставляйте продукт в местах с чрезмерным нагревом — высокие температуры могут вызвать его неисправность.
- Если у вашего устройства возникли проблемы, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неисправностью, вызванной несанкционированной разборкой устройства, однако такие ремонтные работы могут быть выполнены на платной основе по предварительной договоренности.
- Рекомендуется использовать оригинальные аксессуары и кабели. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неисправностями, вызванными использованием неоригинальных аксессуаров, однако такие ремонтные работы также могут быть выполнены на платной основе по предварительной договоренности.
- Продукт сертифицирован в соответствии со стандартами CE, RoHS и FCC. Пожалуйста, эксплуатируйте устройство строго в соответствии с установленными стандартами. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, вызванный нарушением условий эксплуатации, хотя такие ремонтные работы могут быть выполнены на платной основе по предварительной договоренности.
- Инструкции и информация в этом руководстве основаны на тщательно контролируемых процедурах тестирования, произведенных компанией. В случае изменений в дизайне или спецификациях уведомления не предоставляются.

Использование по назначению


Пользователь ознакомился с инструкциями данного руководства. Пользователь использует изделие в пределах условий эксплуатации и ограничений, описанных в этом руководстве.

Неправильное использование

Означает использование изделия иначе, чем описано в данных инструкциях, или в условиях эксплуатации, отличных от указанных в данном руководстве пользователя.

2

Знакомство с устройством

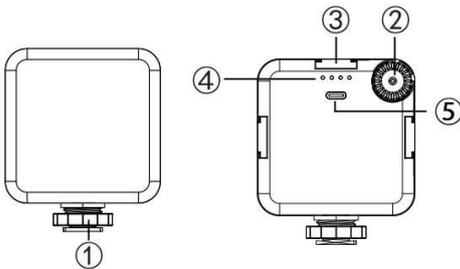


1. Башмак-холодный крепеж
2. Переключатель / Ручка регулировки яркости
3. Холодный башмак
4. Индикатор питания
5. Порт для зарядки Type-C

Установка и использование

1. Зарядка через Type-C

- Во время зарядки индикатор светится синим, а после завершения зарядки загораются все четыре индикатора.

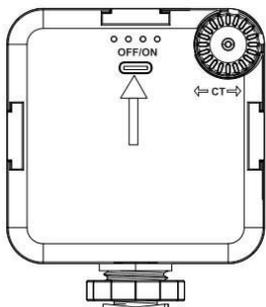


- Поддерживает зарядные устройства с мощностью 5В/2А или внешний аккумулятор.

3


- Зарядка идет медленно в включенном состоянии. Рекомендуется заряжать устройство после его выключения.
- Если заряд аккумулятора низкий, индикатор питания начинает мигать — зарядите устройство своевременно.
- Устройство оснащено кабелем для зарядки Type-C.

2. Кнопка включения/выключения и регулировки яркости

- Используется для включения и выключения устройства.
- Сдвигной регулятор позволяет настроить яркость в диапазоне от 0 до 100%.

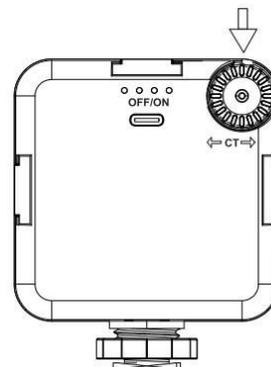


Сборка

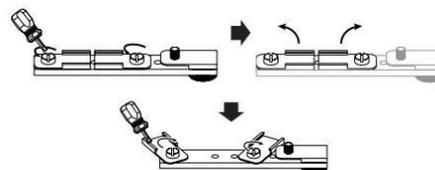

1. Регулировка кронштейна лампы


- Ослабьте винт с помощью отвертки, переместите кронштейн в подходящее положение и затяните винт для фиксации.

4

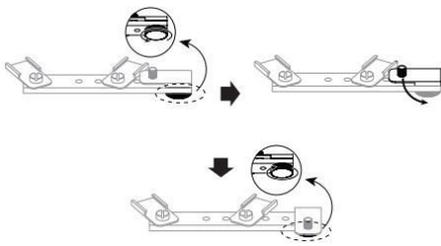


2. Регулировка кронштейна для телефона

Ослабьте нижний винт, отрегулируйте кронштейн в нужное положение и затяните винт.

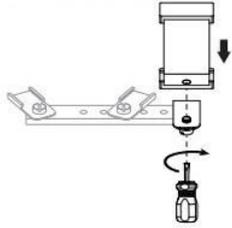

3. Установка держателя телефона


Сначала поверните держатель телефона в нужное положение, затем используйте отвертку, чтобы затянуть нижние винты для фиксации.

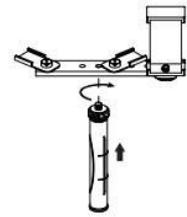

4. Установка рукоятки

Закрепите винт сверху рукоятки на нижней части кронштейна.

5

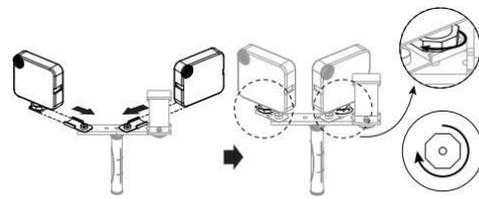


5. Установка LED-освещения

Подключите его через "горячий башмак" и затяните кольцо винта под LED-лампой для фиксации.

Характеристики

- Рабочее напряжение: 3,7 В
- Мощность: 4,0 Вт
- Индекс цветопередачи (Ra): CRI95+
- Яркость: 840 LUX
- Цветовая температура: 5600К
- Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч
- Количество светодиодов: 64


Комплектация

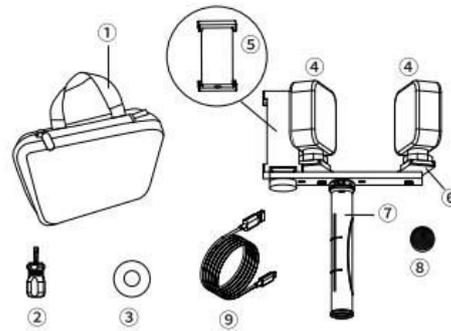

6

1. Сумка для хранения
2. Мини-отвертка
3. Противоскользящая прокладка
4. Мягкий светодиодный светильник
5. Выдвижной зажим для телефона
6. Кронштейн
7. Противоскользящая ручка
8. Запасные винты
9. USB-кабель для зарядки

Устройство в собранном виде

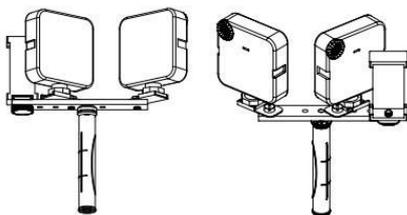

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

7