



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Беспроводная система obturации**

**Sunt smil**



СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Меры предосторожности .....</b>	<b>3</b>
<b>Знакомство с устройством .....</b>	<b>3</b>
<b>Характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>Установка .....</b>	<b>4</b>
<b>Использование .....</b>	<b>4</b>
<b>Стерилизация и обслуживание.....</b>	<b>4</b>
<b>Транспортировка и хранение .....</b>	<b>5</b>
<b>Правильная утилизация.....</b>	<b>5</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	9


## Введение

Модель: OP-Fill может нагреваться до 200 °С за 3 секунды и плавить все виды гуттаперчи. Она поддерживает вертикальную конденсацию гуттаперчи для заполнения корневого канала (главным образом апикальной части) и предназначена исключительно для использования обученными стоматологами в клинике или лаборатории.

## Меры предосторожности

Внимание: Температура наконечника очень высокая во время процедуры, чтобы избежать ожога, не допускайте его прямого контакта с мягкими тканями полости рта.

## Знакомство с устройством

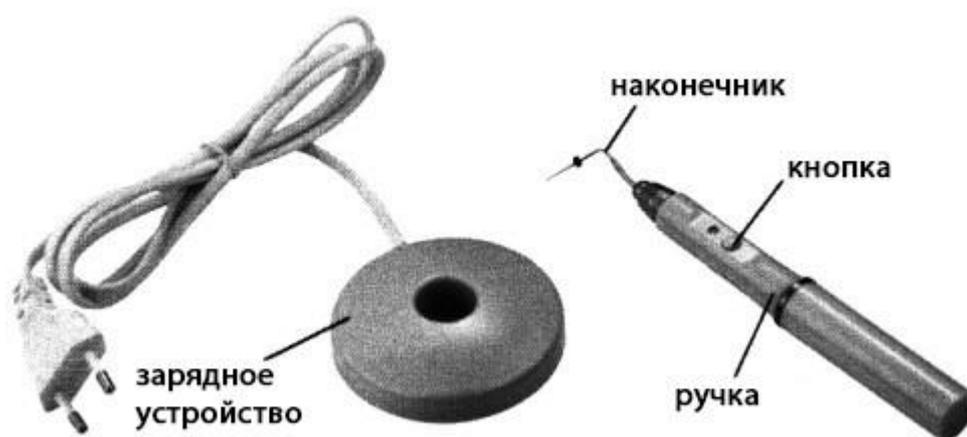

1. Зарядная база — 1 шт.
2. Обтурационная ручка — 1 шт.
3. Наконечники — 2 шт.

## Характеристики

Модель	OP-Fill AC110V	OP-Fill AC220V
Питание	AC 110V, 50~60 Гц	AC 220V, 50~60 Гц
Мощность	10 Вт	10 Вт
Размер упаковки	165 × 125 × 38 мм	165 × 125 × 38 мм

## Установка

Устройство состоит из наконечника, obturационной ручки и зарядной базы.

Установка наконечника



Предупреждение: Будьте осторожны, чтобы не получить ожог при установке наконечника ручки.

## Использование

Нагрев: Нажмите кнопку, чтобы нагреть наконечник, индикатор LED загорится красным. Наконечник может достичь рабочей температуры в течение 3 секунд.

Зарядка: Установите obturационную ручку на зарядную базу, индикатор LED загорится синим. Для полной зарядки при низком заряде требуется не менее 8 часов непрерывной зарядки.

## Стерилизация и обслуживание

Пожалуйста, очищайте и стерилизуйте наконечник ручки перед каждым использованием.

1. Остатки гуттаперчи можно очистить медицинским ватным тампоном.
2. Внешнюю поверхность нагревательного блока и зарядной базы очищайте мягкой тканью, смоченной в мягком моющем средстве или спирте. Поверхность должна быть защищена пластиковым барьером для предотвращения загрязнения и изменения цвета.
3. Не используйте сильные дезинфицирующие средства или содержащие отбеливатель или хлорид аммония для очистки устройства.
4. Не стерилизуйте нагревательный блок и зарядную базу в автоклаве.
5. После каждого использования стерилизуйте наконечники в автоклаве при 121 °C в течение 60 минут.

### **Транспортировка и хранение**

1. Во время транспортировки обращайтесь осторожно, избегайте сильной тряски.
2. Условия хранения:
  - a. Температура окружающей среды: -10 - 55 °C
  - b. Относительная влажность: <85%

### **Правильная утилизация**



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было

приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно!** Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев,

когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-

200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!