



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа
ВКТ-340 36Вт (настольная) с озоном



Версия 1.0

minicam24.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Инструкция по применению	3
3. Техника безопасности	3

1. Описание устройства

Тип товара: Ультрафиолетовая лампа с функцией озонирования помещений;

Мощность: 36Вт;

Напряжение: 220В.

2. Инструкция по применению

1) Подключите устройство к сети, вставив вилку в розетку. Когда устройство включено в сеть, включается синяя подсветка и лампа переходит в режим ожидания.

2) На пульте ДУ нажмите кнопку с выбранным временем стерилизации: [15M], [30M], [60M]. После нажатия кнопки на панели начнёт мигать зеленая подсветка. Через 15 секунд УФ-лампа начинает свою работу. После завершения процесса стерилизации лампа автоматически выключается.

3) Нажатие кнопки [STOP] останавливает процесс стерилизации. На панели загорается зеленая подсветка, сигнализируя о том, что устройство вернулось в режим ожидания.

Выбор времени стерилизации:

15 мин: для помещений небольшой площади, таких как туалет, ванная комната.

30 мин: для помещений среднего размера, таких как спальня, гостиная, кухня.

60 мин: для больших помещений, таких как большая гостиная или небольшой конференц-зал.

3. Техника безопасности

Недопустимо смотреть прямо на УФ-лампу, находиться в помещении во время обработки. Проветривайте комнату в течение 10-40 минут после использования УФ-лампы, чтобы избежать вредного воздействия озона на слизистые оболочки человека.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или другим специалистом, перед тем как использовать лампу в медицинских целях. Обратитесь к специалисту

при возникновении негативных последствий использования лампы в присутствии людей.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с ветеринаром или другим специалистом, перед тем как использовать бактерицидную лампу на фермах или в других местах содержания животных. Обратитесь к специалисту при возникновении негативных последствий использования лампы в присутствии животных.

Внимание:

- 1) При первом использовании бактерицидной лампы, вокруг нити накаливания может образовываться белый туман, что нормально для первого использования устройства.
- 2) Внутри УФ-лампы можно заметить небольшой кусочек металла – это сплав ртути, который необходим для нормальной работы УФ-лампы.
- 3) Не рекомендуется использовать бактерицидную ультрафиолетовую лампу дольше 60-ти минут.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**