



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Слуховой аппарат EM G-30



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
1.1 Комплектация	3
1.2 Технические характеристики	3
2. Меры предосторожности	3
3. Зарядка аппарата.....	4
4. Использование слухового аппарата.....	4
5. Уход и хранение	4
6. Рекомендации по использованию.....	5

1. Описание устройства

Благодарим вас за покупку нашего слухового аппарата.

Если вам трудно хорошо слышать окружающих, слуховой аппарат поможет вам восстановить слух, чтобы вы могли жить привычной жизнью.

Ношение слухового аппарата поможет Вам заново открыть для себя удовольствие от общения с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе и наслаждаться фильмами, музыкой и ТВ-шоу.

Слуховой аппарат EM G-30 удобен в использовании, благодаря следующим функциям:

- Усиление звука до 30 раз с низким фоновым шумом.
- Встроенный аккумулятор, удобный для подзарядки.
- Работа устройства до 8-10 часов непрерывного использования.
- Сменные ушные вкладыши для защиты от шума.

1.1 Комплектация

В комплекте с устройством поставляется:

- Адаптер;
- Док-станция;
- Кисточка для чистки;
- Шесть силиконовых вкладышей.

1.2 Технические характеристики

- Батарея: 1,2 В;
- Потребление мощности: ≤ 3 мА;
- Уровень шума: ≤ 28 дБ;
- Частота: 100 – 4000 Гц;
- Усиление: 30 дБ;
- Искажение: 6%;

2. Меры предосторожности

- Не допускайте использование устройства детьми младше 15 лет.
- Держите вне зоны досягаемости детей и домашних животных.
- Следите за тем, чтобы питание не было закорочено.

- Прекратите использование продукта в случае возникновения раздражения. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как возобновить использование устройства.
- Не снимайте слуховой аппарат с док-станции, пока устройство полностью не зарядится и индикатор не начнет светиться зеленым.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство.

3. Зарядка аппарата

Важно следовать инструкциям ниже для первых двух циклов зарядки.

- 1) Сдвиньте переключатель вниз, расположенный на задней части наушника, чтобы выключить слуховой аппарат.
- 2) Подключите док-станцию к розетке с помощью адаптера. После подключения одновременно загорится красный индикатор адаптера и зеленый индикатор док-станции.
- 3) Поместите слуховой аппарат в док-станцию для подзарядки. Индикатор на док-станции станет красным при правильном подключении.

4. Использование слухового аппарата

- Перезаряжаемый слуховой аппарат поставляется в комплекте с шестью силиконовыми вкладышами. Подберите подходящий вам по размеру вкладыш и наденьте его на аппарат.
- Носить аппарат для усиления слуха можно как на правом, так и на левом ухе.
- Под колесом регулировки громкости находится переключатель. Сдвиньте его вверх, чтобы включить аппарат.
- Наденьте аппарат на нужное ухо.
- Вставьте наушник с вкладышем в слуховой проход.
- Отрегулируйте громкость до желаемого уровня.
- Когда вы хотите прекратить использование слухового аппарата, сдвиньте переключатель вниз, чтобы выключить.

5. Уход и хранение

- Ежедневно чистите наушник и силиконовый вкладыш в ухо прилагаемой кисточкой от грязи и серы;

- Протирайте слуховой аппарат от пыли и грязи сухой чистой тканью;
- Если вы не планируете использовать слуховой аппарат в течение долгого времени, уберите его в темное, сухое, прохладное место.

6. Рекомендации по использованию

Рекомендуется обратиться к сертифицированному врачу перед тем, как надеть какой-либо слуховой аппарат, и проводить постоянные проверки, чтобы убедиться, что ни одно из следующих условий не применимо. Ниже приведены условия, при которых НЕ следует носить слуховой аппарат. Не носите слуховой аппарат, если.

- Вы чувствуете боль и дискомфорт в ухе.
- У вас травмы или деформации уха.
- Вы чувствуете острое или хроническое головокружение.
- У вас в анамнезе есть внезапная или быстро прогрессирующая потеря слуха, произошедшая в течение последних 90 дней.
- У вас односторонняя потеря слуха в течение последних 90 дней.
- Пороги костной проводимости лучше, чем ваши пороги воздушной проводимости, на 15 дБ или больше.
- У вас имеется значительное скопление серы или других материалов в ушном канале.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**