

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Слуховой аппарат Ахон А-60**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение .....	3
2. Внешний вид.....	3
3. Использование.....	3
4. Зарядка .....	4
5. Технические характеристики .....	4
6. Меры предосторожности .....	5
7. Обслуживание .....	5
8. Решение проблем.....	5


## 1. Введение

Благодарим вас за покупку нашего слухового аппарата.

Если вам трудно хорошо слышать окружающих, слуховой аппарат поможет вам восстановить слух, чтобы вы могли жить привычной жизнью.

Ношение слухового аппарата поможет Вам заново открыть для себя удовольствие от общения с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе и наслаждаться фильмами, музыкой и ТВ-шоу.

## 2. Внешний вид

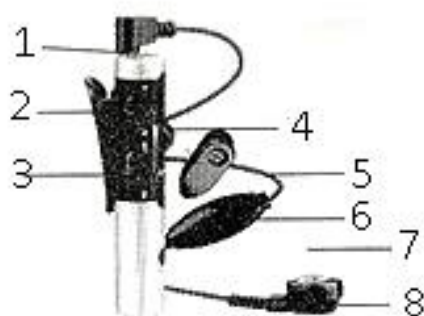

1. Разъем для подключения.
2. Переключение режимов N – нормальный режим. N – использование в шумных местах.
3. Включение и отключение.
4. Регулировка громкости.
5. Провод наушника.
6. Микрофон.
7. Силиконовый вкладыш в ухо.
8. Наушник

## 3. Использование

1. Наденьте силиконовую насадку на наушник.
2. Подсоедините провод наушника к слуховому аппарату.
3. Плотно вставьте слуховой аппарат с затычкой в ухо.

Внимание

Убедитесь, что слуховой аппарат находится в положении «Выкл.» или громкость установлена на минимальном значении «1», иначе резкий звук заставит вас чувствовать себя некомфортно.

4. Включите слуховой аппарат и отрегулируйте громкость, чтобы получить чистый звук.
5. Перемещайте его вверх и вниз, чтобы убедиться, что он находится в правильном положении.
6. Когда вы находитесь в шумных местах, вы можете включить режим «Н», чтобы уменьшить шумы низкой частоты.

#### **4. Зарядка**

1. Выключите ваш слуховой аппарат перед тем, как приступить к его зарядке.
2. Подключите зарядное устройство в соответствующий разъем слухового аппарата. Вторым концом подключите адаптер к сети электропитания. Во время зарядки устройства будет гореть ровным светом красный индикатор. Когда устройство полностью зарядится, погаснет красный светодиодный индикатор и загорится ровным светом зеленый индикатор.
3. Первая зарядка батареи нового слухового аппарата должна проводиться в течение 8 часов. Все последующие зарядки можно проводить в течение 2 часов.
4. Встроенная литиевая батарея на 90 мАч может работать до 30 часов после полной зарядки. Её можно перезаряжать и перерабатывать.
5. Всегда следите за состоянием батареи. Не разбирайте её и не пытайтесь наполнить заново.

#### **5. Технические характеристики**

Источник питания	5 В, 50 мА
Батарея	Литиевая батарея 90 мАч
Размер	66x13x13
Вес	Около 10 г
Максимальный вывод звука	130±5 дБ
Увеличение звука	≥ 50 дБ
Искажение звуковой волны	< 5%
Диапазон частот	300 – 40000 Гц
Входящий шум	≤ 30 дБ
Напряжения	3,7 В
Потребление тока	≤ 4 мА

## **6. Меры предосторожности**

1. Если вы слышите свистящий звук, убедитесь, что вы плотно вставили амбюшуру или используете её подходящего размера.
2. Когда слуховой аппарат показывает очень низкий уровень заряда батареи, заряжайте слуховой аппарат.
3. Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на высокой громкости в течение длительного времени. Это повредит ваш слуху.
4. Пожалуйста, постоянно следите за состоянием слухового аппарата все время, чтобы избежать блокирования отверстия для ушей и микрофона посторонними предметами, например, ушной серой или другими загрязнениями.
5. Пожалуйста, не используйте во время душа, плавания, дождя или во влажной среде.
6. Не подвергайте слуховой аппарат воздействию солнечных лучей, не подносите его к плите или другим источникам тепла.
7. Тщательно защищайте слуховой аппарат от ударов и не роняйте его на пол.
8. Пожалуйста, используйте указанные аккумуляторы и зарядное устройство, специально разработанные для этого слухового аппарата.
9. Не разбирайте и не ремонтируйте слуховой аппарат.
10. Держите слуховой аппарат подальше от детей.

## **7. Обслуживание**

Выключите слуховой аппарат перед началом обслуживания.

Используйте чистую сухую ткань без моющих средств для чистки корпуса аппарата.

## **8. Решение проблем**

Отсутствие звука из слухового аппарата может быть вызвано следующими причинами:

1. Аппарат выключен;
2. Батарея села;
3. Наушник повреждён;

Если звук стал очень слабым или нечётким, возможно, это вызвано двумя причинами:

1. Батарея почти села, зарядите;
2. Громкость слишком низкая, увеличьте.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**